



Installationsanleitung



Medizinprodukt *ParkinsonGo TM*
Medizinprodukt der Klasse I nach Medizinprodukteverordnung (MDR)

Kontaktinformationen auf einen Blick

Verantwortlich für ParkinsonGo

Portables Healthcare Technologies GmbH

Henkestraße 91

91052 Erlangen

www.portables-hct.de

Wichtige Kontaktdaten:

datenschutz@portables-hct.de

support@portables-hct.de

Rechtlicher Hersteller des Medizinprodukts ParkinsonGo TM



be-on-market GmbH

Lilienstrasse 33

D-91244 Reichenschwand

www.be-on-market.com

Portables HealthCare Technologies GmbH – Henkestraße 91 – 91052 Erlangen

Kontakt: support@portables-hct.de/ 09131- 9402807

www.parkinson-go.de

Liebe Patientinnen und Patienten!

Wir begrüßen Sie herzlich zur Nutzung von ParkinsonGo TM. Die App wurde in langjähriger enger Zusammenarbeit mit Neurologen sowie mit medizinischem Fachpersonal und Patienten entwickelt.




ParkinsonGo TM begleitet Sie aktiv in Ihrem Alltag. Die App analysiert Ihr Gangbild, erfasst Symptommuster sowie Ihr tägliches Befinden und leitet daraus individuell auf Sie zugeschnittene Coachingmaßnahmen wie Trainingsübungen und Tipps für Sie ab. Für Ihre behandelnden Ärzte sind die Informationen aus Ihrem Alltag sehr nützlich, um im Bedarfsfall eine Therapie noch besser auf Sie persönlich abzustimmen. Darüber hinaus steht Ihnen eine Parkinson-Nurse als persönlicher Ansprechpartner zur Seite.

Download der App aus den Appstores

		Bitte scannen Sie mit Ihrem jeweiligen Smartphone den angezeigten QR-Code.
Android	iOS	



Der jeweilige App-Store öffnet sich automatisch und die App „ParkinsonGo TM“ wird Ihnen zum Installieren angezeigt.

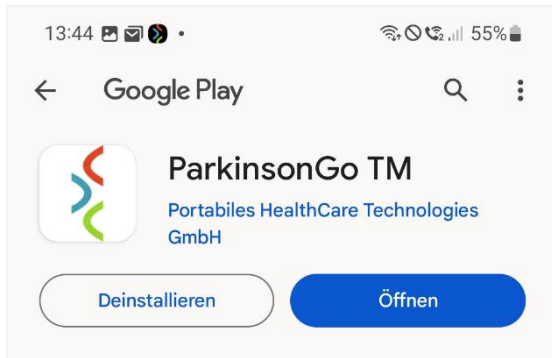

Öffnen Sie die App nach erfolgreicher Installation!
(Hier: Beispiel eines Android-Smartphones)



Die Funktionalität der App wird kurz erläutert! Klicken Sie jeweils auf „weiter“.

Erstellen des Benutzerkontos

Erstellen Sie Ihr „Benutzerkonto“ auf Basis Ihrer E-Mailadresse und bestätigen Sie den Link, den Sie in Ihrem E-Mailpostfach finden (ggf. SPAM-Ordner checken).

Im nächsten Schritt erklären Sie Ihre Teilnahme am Versorgungskonzept sowie Ihr Einverständnis zur damit verbundenen Datenverarbeitung.
Setzen Sie die entsprechenden Haken.

Registrierung

Ich habe folgende Dokumente gelesen und willige jeweils in die Verarbeitung meiner Daten ein:

- Teilnahme und Einverständniserklärung Selektivvertrag
- Datenschutzerklärung Selektivvertrag
- Datenschutzerklärung bestimmungsgemäßen Gebrauch von ParkinsonGo TM
- Nutzungsbedingungen ParkinsonGo TM

Ich bin mit einer Befragung zur Sicherstellung einer dauerhaft hohen Qualität des Versorgungsangebots einverstanden. (optional)

Sie können die Einwilligung jederzeit widerrufen. Wenden Sie sich dazu an datenschutz@portables-hct.de.

Anmelden und Einrichten des persönlichen Profils

Anmeldung

Willkommen! Bitte melde Dich an.

E-Mail

Passwort

Automatisch mit Fingerabdruck oder Gesichtserkennung einloggen. ¹

Anmelden

Loggen Sie sich mit Ihrer E-Mailadresse und Ihrem Passwort ein (empfohlen: Komfort-Log-In über Touch-ID oder Face-ID)

Mein Profil

Erstelle dein persönliches Profil

Deine Angaben sind wichtig für die individuelle Auswertung deiner Daten.

43.0 EU

186 in cm

1952

Weiblich Männlich

Profil anlegen

Erstellen Sie anschließend Ihr persönliches Benutzerprofil.

Sie werden auch nach Ihrer Versicherungsnummer und der Nummer Ihrer Krankenkasse gefragt. Diese finden Sie vorne auf Ihrer Gesundheitskarte.

Mein Profil

Deine persönliche ID.

#phpM5yrB

Bitte teile deinem Arzt deine

Anschließend wird Ihre persönliche ID generiert. Ihre Parkinson Nurse wird Sie nach dieser ID fragen.

Sie finden sie auch in den Einstellungen der App unter „Persönliche ID“.

Sensoren bestellen

Lieferadresse

Mustermann

Beispielallee 100

Musterstadt

99001

Telefonnummer

Adresszusatz oder besondere Informationen zum Lieferort (optional)

Weiter

- Für die Aufzeichnung Ihres Ganges werden Sensoren benötigt, welche Sie im nächsten Schritt bestellen können.
- Geben Sie dazu Ihre Lieferadresse in die entsprechenden Adressfelder ein und tippen Sie auf „weiter“.
- Wir benötigen Ihre Telefonnummer, damit Ihre Nurse Sie kontaktieren kann.
- Die Sensoren werden Ihnen in den nächsten Tagen postalisch zugestellt.

Kontaktaufnahme durch die Parkinson Nurse und Sensoren



Innerhalb von 3 Werktagen nimmt eine Tele-/Parkinson-Nurse per Telefon Kontakt mit Ihnen auf und erläutert Ihnen das weitere Vorgehen.



Die Sensoren werden innerhalb von 5 Werktagen samt detailliertem Handbuch per Post bei Ihnen eintreffen. Die Tele-/ Parkinson- Nurse kontaktiert Sie nun erneut, um Sie in die Nutzung der Applikation „ParkinsonGo TM“ einzuweisen.